



Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des Deaktivierungsschalter!

Der Deaktivierungsschalter ermöglicht, das IQCare System manuell zu steuern. Die Sensor-
matratze kann jederzeit auf Wunsch außer Betrieb gesetzt werden. Spätestens nach 15
Minuten wird das System automatisch wieder aktiviert.

Wichtig: Voraussetzung für das Anlernen des Deaktivierungsschalters ist, dass bereits ein IQ
Care System an dem Funkempfänger angelernt ist.

Sie benötigen:



Ein kleiner Schraubendreher oder eine Büroklammer erleichtern Ihnen die vorzunehmenden Einstellungen über die **CLR**- und **LRN**-Tasten.

1. Vorbereitung

Damit Sie den neuen Schalter an den Funkempfänger anlernen können, ziehen Sie den Fun-
kempfänger aus der Steckdose und gehen Sie nach folgenden Schritten vor.

2. Programmierung



2.1. Stecken Sie den Funkempfänger in die Steckdose und versorgen sie
diesen so mit Strom. Die **LRN** Taste leuchtet rot.



2.2. Drücken Sie die **LRN** Taste ca. 10 Sekunden bis die **CLR** Taste grün
blinkt.



2.3. Drücken Sie jetzt dreimal schnell hintereinander auf
die **0** des Deaktivierungsschalters. Die **CLR** Taste
leuchtet kurzzeitig (2 Sek.), dauerhaft grün. Das er-
neute Blinken signalisiert, dass der Schalter erkannt
wurde.



2.4. Zum Speichern der Einstellung, die **CLR** Taste kurz drücken. Die **LRN**
Taste leuchtet wieder dauerhaft rot.



3. Funktionskontrolle:



Drücken Sie nun die **0** auf dem Deaktivierungsschalter und setzen Sie das IQCare System außer Funktion. **LRN** und **CLR** müssen gleichzeitig rot blinken. Das System wird über das Drücken der **I** auf dem Schalter sofort wieder aktiviert.

Wenn Sie das System nicht aktiv über den Schalter aktivieren, schaltet sich das System automatisch nach 15 Minuten wieder ein.



Technische Daten

Art.Nr. 1817	Wandsender
Sendeleistung:	10 mW
Umgebungstemperatur:	-25° bis +65°C
Rel. Luftfeuchte:	0% bis 95%
Approbationen:	CE
Maße:	75 x 17 mm
Schaltweg:	1,5 mm

Herstellergarantie

Wir leisten Gewähr im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen. Im Falle einer Reklamation senden Sie bitte das zu beanstandende Produkt mit einer aussagefähigen Fehlerbeschreibung an uns zurück.

Den Rückversand nehmen Sie bitte frei Haus vor!



Sie haben weitere Fragen?

Unser Support steht Ihnen **24 Stunden** unter **support@iqfy.de** zur Verfügung.

Wir beantworten Ihre Fragen kurzfristig!

Zu den Bürozeiten, **8.00 - 17.00 Uhr**, stehen wir Ihnen auch gerne persönlich zur Verfügung:

+49 2354 / 9449969

